

Descrizione	Il visore VIS02 è un Dispositivo di Protezione Individuale di II categoria. Può essere utilizzato in abbinamento a lenti o occhiali correttivi e, mediante le bande elastiche di supporto, si adatta alle diverse conformazioni del volto dell'utilizzatore adulto. Il DPI può essere utilizzato in abbinamento a maschere chirurgiche o DPI di protezione delle vie aeree quali facciali filtranti (FFP1, FFP2, FFP3). Il DPI è dotato di una fascia di interfaccia in schiuma poliolefinica sanitaria. Il DPI è stato progettato per proteggere l'utilizzatore dall'esposizione a gocce e spruzzi liquidi di esclusiva natura biologica secondo la UNI EN 166:2004.
Settori d'impiego	Ambienti in cui è possibile l'esposizione ad agenti biologici quali batteri, parassiti, funghi, virus quali: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Servizi sanitari comprese le unità di isolamento e post mortem (118, pronto intervento, malattie infettive, broncoscopie, TBC, HIV, anatomia patologica ecc...); ➢ Settore veterinario (es. influenza aviaria, bse, blu tongue, carbonchio ecc...); ➢ Laboratori clinici, veterinari, microbiologici e diagnostici;
Caratteristiche	Ampio campo visivo, Ergonomia e facilità di regolazione ed adattamento all'utilizzatore, Leggero (<200g), idoneo all'uso con facciali filtranti e lenti correttive, idoneo all'uso protettivo contro gocce e spruzzi liquidi di natura biologica
Ricambi/accessori	Non previsti
Pulizia	Utilizzare acqua tiepida e sapone neutro e risciacquare con acqua utilizzando una spugna morbida
Sterilizzazione	<u>Non idoneo alla sterilizzazione in autoclave</u> – Sterilizzare utilizzando ossido di etilene per impiego in ambienti sterili
Condizioni di stoccaggio	Proteggere dalla luce diretta del sole, dalle luci fluorescenti, dai raggi X ed ozono; Conservare il dispositivo all'interno della sua confezione fino al momento dell'utilizzo; Stoccare in luogo asciutto, pulito e privo di polvere, lontano da oggetti taglienti o appuntiti; Stoccare a temperature comprese tra +5 e +40°C con umidità relativa inferiore al 60%
Imballo	Contenitore in polietilene
Scadenza	Il visore è utilizzabile entro 5 anni se conservato nell'imballo originale e nelle condizioni elencate sopra – il lotto (mese/anno) di produzione è riportato sull'item VIS02_SH
Riutilizzo del dispositivo	Il dispositivo danneggiato, graffiato, rigato, tagliato, scheggiato, o recante danni di qualsivoglia genere che ne possano precludere la funzionalità, non va utilizzato. Se esposto ad agenti biologici, il dispositivo può essere riutilizzato solo se adeguatamente sottoposto a sterilizzazione mediante ossido di etilene
Materiali	Latex free, solvent free. Visiera in PETg, frame di supporto in PVC, ganci di supporto banda elastica in PVC, schiuma espansa in poliolefinico per uso sanitario, banda elastica in elastomero privo di lattice e solventi.
AVVERTENZE	
Il dispositivo va utilizzato sempre in abbinamento a mascherine chirurgiche o facciali filtranti, secondo le direttive in materia di sicurezza sul lavoro applicabili, quando l'utilizzatore sia esposto ad agenti di natura biologica. La	

<p>principale funzione del dispositivo è quella di protezione delle mucose degli occhi dal contatto diretto con agenti di natura biologica. I materiali che possono venire a contatto con la pelle del portatore possono causare, in individui particolarmente sensibili, reazioni allergiche.</p> <p>Sostituire immediatamente il dispositivo qualora lo stesso abbia subito o presenti danni così come descritti sopra. Il dispositivo non è adatto ad un uso prolungato</p>	
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rimuovere il dispositivo dall'imballo. L'imballo contiene: <ul style="list-style-type: none"> ✓ N1 Visore trasparente dotato di pellicola protettiva su ambo i lati; ✓ N1 Struttura di supporto; ✓ N1 Fascia elastica di supporto dotata di due ganci in plastica; 2. Rimuovere accuratamente la pellicola protettiva da uno dei due lati del visore trasparente; 3. Montare il visore sulla struttura di supporto (il montaggio è intuitivo e rapido) con la pellicola protettiva rivolta verso l'esterno – verificare la data di produzione del lotto e smaltire se è trascorso un periodo superiore a 5 anni; 4. Agganciare la fascia elastica nei fori predisposti; 5. Rimuovere la pellicola protettiva dal lato anteriore del dispositivo; 6. Ispezionare il visore. Non utilizzare il visore se sono presenti danni, graffi, rigature, tagli, scheggiature, o danni di qualsivoglia genere che ne possano precludere la funzionalità; 7. Indossare eventuali facciali filtranti e/o occhiali protettivi; 8. Pulire il visore se necessario; 9. Indossare il visore facendo dapprima aderire lo stesso alla fronte, successivamente disponendo la fascia elastica dietro al capo 	
SMALTIMENTO	
Si riportano di seguito le categorie di smaltimento per ognuno dei componenti del visore VIS02. ATTENZIONE: in caso di utilizzo in ambiente contaminato o ospedaliero, rispettare le prescrizioni applicabili. In caso di utilizzo in ambiente non contaminato, lo smaltimento è assimilabile a quello dei rifiuti urbani e di seguito classificato per componente	
 	Visiera
 	Supporto visiera e ganci
 	Imballo

U.INAIL.72000.06/05/2020.0011458